

NÁVOD K POUŽITÍ

Pokyny pro skladování: Chraňte před slunečním zářením a před vlhkem.

Upozornění:

- Vždy se ujistěte, že výrobek je kompletní, správně nasazen a nošen po celou dobu expozice.
- Tento prostředek nechrání proti plynům/výparům.
- Tento prostředek nepoužívejte jako ochranu před atmosférickými kontaminanty, jejich koncentrace nejsou známy, nebo jsou bezprostředně nebezpečné pro zdraví či život.
- Nepoužívejte, máte-li vousy nebo jakékoliv jiné ochlupení obličeje, které by mohlo zamezit těsnému přilnutí mezi obličejem a ochranným prostředkem.
- Tento prostředek neeliminuje riziko kontraktace nemoci či infekce.
- Jakýkoli závažný incident, ke kterému dojde v souvislosti s tímto prostředkem, ohlaste společnosti a příslušnému místnímu kontrolnímu úřadu.
- Zničte a vyměňte respirátor, jestliže je kontaminován krví nebo jinými infekčními kontaminanty, když je poškozen, když se dýchání stává obtížným. Po ukončení jeho používání zajistěte jeho likvidaci v souladu s požadavky směrnice na likvidaci nebezpečného infekčního materiálu.
- Tento prostředek je určen pouze k jednorázovému použití. Jeho opakované použití může způsobit křížovou kontaminací, ohrozit bezpečnost uživatele a zhoršit celkový výkon produktu. Kontaminované výrobky je třeba likvidovat jako nebezpečný odpad v souladu s národními předpisy. Neupravujte, nečistěte ani neopravujte tento prostředek.
- Tento prostředek není ohnivzdorný. Nepoužívejte v přímém kontaktu s otevřeným ohněm.
- Nepoužívejte v ovzduší obsahující méně než 19,5% kyslíku (definice společnosti; některé země mohou mít vlastní definice nedostatku kyslíku; pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou pomoc).
- Nedodržení výše uvedených pokynů nebo neodborná manipulace s prostředkem na ochranu dýchacích orgánů během pobytu uživatele v kontaminovaném prostředí může mít nežádoucí účinky na zdraví a vést k vážnému onemocnění.

Měsíc a rok výroby a expirace prostředku jsou uvedeny na obalu prostředku.

Datum poslední revize návodu k použití: 2021-01-01

Určený účel použití: Určeným účelem respirátoru je ochrana jeho nositele filtrací vdechovaného vzduchu a snížení přenosu infekce mezi osobami. Účinnost filtrace je $\geq 95\%$. Jedná se o jednorázový prostředek.

Typ: Filtrační polomaska proti částicím EN149:2001+A1:2009, **účinnost:** FFP2 NR.

Respirátor FFP2 je osobním ochranným prostředkem (dále jen prostředek) dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/ 425, o osobních ochranných prostředcích. Zvláštní pozornost je třeba věnovat výstražným nápisům.

Postup aplikace:

Prostředek si nasazujte jen čistýma rukama. Všechny součásti respirátoru by měly být před použitím zkontrolovány, zda nejsou poškozeny. Používejte obě ruce.

1. Rozbalte respirátor a uchopte ho za postranní gumičky.
2. Nasadte respirátor na obličej tak, aby pokrýval nos a ústa - a končil pod bradou.
3. Postranní gumičky přichyťte za uši.
4. Prsty zkontrolujte a dotvarujte svorku, která přiléhá k nosu.
5. Zkontrolujte po obvodu respirátoru, že přiléhá k obličejí.

Ilustrativní obrázek postupu aplikace:



Kontrola těsnosti a nasazení:

1. Oběma rukama zakryjte přední část respirátoru - postupujte opatrně, aby se tím nezměnila poloha respirátoru.
 2. Prudce vydechněte.
 3. Pokud bude vzduch pronikat kolem nosu, upravte tvar nosové svěrky. Znovu zkontrolujte těsnost nasazení postupem uvedeným shora.
 4. Pokud bude vzduch pronikat kolem okrajů polomasky, upravte boční úchyty kolem uší, dokud se průnik vzduchu neodstraní. Těsnost nasazení překontrolujte postupem shora.
 5. Pokud se nepodaří prostředek náležitě nasadit, vyměňte respirátor a původní dále nepoužívejte.
 6. Pokud vzduch neproniká, můžete respirátor použít.
- Pro dosažení lepší těsnosti použijte spojku s upnutím za hlavu.